

SYSTANE® nedvesítő szemcsepp a szemszárazság enyhítésére
HASZNÁLAT ÚTMUTATÓ

SYSTANE® nedvesítő szemcsepp a szemszárazság enyhítésére

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi használati útmutatót és őrizze meg a későbbi felhasználás céljából.

LEÍRÁS:

A **SYSTANE® nedvesítő szemcsepp** egy steril oldat, amely polietilén-glikol 400-t, propilén-glikolt, hidroxipropil-guart, bórsavat, kalcium-kloridot, magnézium-kloridot, kálium-kloridot, nátrium-kloridot, cink-kloridot és 0,001% POLYQUAD® (polipodronium-klorid) tartósítószeret tartalmaz.

JAVALLAT:

A **SYSTANE® nedvesítő szemcsepp** a száraz szem kezelésére szolgál: átmenetileg megszünteti a szemszárazság okozta égő érzést és irritációt.

ELLENJAVALLAT:

A **SYSTANE® nedvesítő szemcsepp** összetevőivel szembeni allergia esetén a készítmény használata ellenjavallt.


ALKALMAZÁS:

A **SYSTANE® nedvesítő szemcsepp** egész nap szükség szerint alkalmazható. A kontaktlencse viselés során kialakuló száraz szem kezelésére is használható: a kontaktlencse felhelyezése előtt illetve a lencsék kivételét követően cseppentsen pár cseppet szemébe, majd pislogjon párszor.

FIGYELMEZTETÉSEK:

Fontos, hogy kövesse szemorvosa utasításait, valamint a használat útmutatóban leírtakat. Amennyiben állandóan fennálló kellemetlen érzést tapasztal a szemében, vagy erőteljes könnyezés, látási zavarok vagy szemvörösödés alakul ki, forduljon orvosához, mivel az állapot súlyosbodhat.

FIGYELMEZTETÉSEK:

- A beszenyeződés elkerülése érdekében a flakon cseppentőjét soha ne érintse semmilyen felülethez.
- Használatot követően csavarja vissza a kupakot.
- Szobahőmérsékleten tárolandó.
- Használaton kívül tartsa szorosan zárva a flakont.
- A csomagoláson jelzett lejáratási időn belül használja fel az oldatot. 
- Az első felnyitást követően 6 hónap elteltével dobja el a maradék oldatot.
- Gyermekektől elzárva tartandó.

KISZERELÉS:

A szűrővel és gőzzel sterilizált **SYSTANE® nedvesítő szemcsepp** műanyag flakonban, 5-15 ml-es (egy vagy több flakont tartalmazó) kiszereelésben kerül forgalomba. Nem feltétlenül mindegyik kiszereelés kerül kereskedelmi forgalomba.

STERILE	A
---------	---

FORGALMAZÓ:

Alcon Hungária Kft.
1117 Budapest
Irinyi u. 4-20.

GYÁRTÓ:

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway

Fort Worth, Texas, USA 76134-2099

MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGBEN:

Alcon Laboratories (U.K.) Ltd.

Boundary Way

Hemel Hempstead

Hertfordshire

HP2 7UD Egyesült Királyság

Amerikai szabadalmi számok: 6,403,609, 6,583,124, 8,838,449.

Európai szabadalmi szám: 0999825.

CE 0123

© 2003, 2008, 2009 Alcon, Inc.

SYSTANE® Lubricating Eye Drops

CARTON LABEL

Alcon® (logo)

SYSTANE® nedvesítő szemcsepp a szemszárazság enyhítésére

A szemszárazság okozta égő érzés és irritáció átmeneti enyhítésére.



5 ml (vagy egyéb kiszerezés, és több flakont tartalmazó kiszerezés)

FELBONTÁSVÉDELEM: Ne használja a készítményt, ha a védőzár sérült vagy hiányzik, vagy ha a biztonsági kupak sérült. Felnyitott vagy sérült készítményt ne használjon.

Az alkalmazás leírását és a fontos biztonságossági információkat lásd a használati útmutatóban.



Szobahőmérsékleten tárolandó.

A csomagoláson jelzett lejáratási időn belül használja fel az oldatot. 

Az első felnyitást követően 6 hónap elteltével dobja el a maradék oldatot.

ÖSSZETÉTEL:

A **SYSTANE® nedvesítő szemcsepp** egy steril oldat, amely polietilén-glikol 400-t, propilén-glikolt, HIDROXIPROPIL-GUAR-t bórsavat, kalcium-kloridot, magnézium-kloridot, kálium-kloridot, nátrium-kloridot, zink-kloridot és 0,001% POLYQUAD (polipodronium-klorid) tartósítószeret tartalmaz.

LOT



FORGALMAZÓ:

Alcon Hungária Kft.

1117 Budapest

Irinyi u. 4-20.

GYÁRTÓ:

Alcon Laboratories, Inc.

6201 South Freeway

Fort Worth, TX, USA 76134-2099

Amerikai szabadalmi számok: 6,403,609, 6,583,124, 8,838,449

Európai szabadalmi szám: 0999825.



© 2003, 2008, 2009 Alcon, Inc.

SYSTANE® Lubricating Eye Drops

BOTTLE LABEL – 5mL Size and Multilingual

Alcon® (logo)

SYSTANE® nedvesítő szemcsepp a szemszárazság enyhítésére



5 ml (vagy egyéb kiszerelés)



Szobahőmérsékleten tárolandó.

Az első felnyitást követően 6 hónap elteltével dobja el a maradék oldatot.

Ne használja a készítményt, ha a védőzár sérült vagy hiányzik, vagy ha a biztonsági kupak sérült.

A beszennyeződés elkerülése érdekében a flakon cseppentőjét soha ne érintse semmilyen felülethez.

Használaton kívül tartsa szorosan zárva a flakont.

LOT



Gyártó:

Alcon Laboratories, Inc.

Fort Worth, TX USA 76134-2099

Amerikai szabadalmi számok: 6,403,609, 6,583,124, 8,838,449.

Európai szabadalmi szám: 0999825. (**OPTIONAL**)

CE 0123

© 2003, 2008, 2009 Alcon, Inc.

SYSTANE® Lubricating Eye Drops

BOTTLE LABEL – 10mL and 15mL Sizes

Alcon® (logo)

SYSTANE® nedvesítő szemcsepp a szemszárazság enyhítésére



10 ml (vagy egyéb kiszerelés)



Szobahőmérsékleten tárolandó.

Az első felnyitást követően 6 hónap elteltével dobja el a maradék oldatot.

Ne használja a készítményt, ha a védőzár sérült vagy hiányzik, vagy ha a biztonsági kupak sérült.

A beszennyeződés elkerülése érdekében a flakon cseppentőjét soha ne érintse semmilyen felülethez.

Használaton kívül tartsa szorosan zárva a flakont.

ÖSSZETÉTEL:

Polietilén-glikol 400, propilén-glikol, hidroxipropil-guar, bórsav, kalcium-klorid, magnézium-klorid, kálium-klorid, nátrium-klorid, zink-klorid és 0,001% POLYQUAD® (polipodronium-klorid).

LOT



GYÁRTÓ

Alcon Laboratories, Inc.

Fort Worth, TX USA 76134-2099

Amerikai szabadalmi számok: 6,403,609, 6,583,124, 8,838,449.

Európai szabadalmi szám: 0999825. (OPTIONAL)

CE 0123

© 2003, 2008, 2009 Alcon, Inc.